

Instrumentendesinfektion

1. Bitte benutzen Sie zur Instrumentendesinfektion eine Wanne mit Deckel.



2. Setzen Sie die Instrumentendesinfektionslösung exakt nach Herstellervorgabe an und verwenden Sie hierbei geeignete Messbecher.

Tragen Sie hierbei Handschuhe und ggf. Schutzbrille.



3. Bitte beachten Sie die erforderliche Einwirkzeit!



4. Reinigen und spülen Sie die Instrumente nach der Desinfektion unter fließendem Wasser und trocknen Sie diese ab. Lagern Sie die desinfizierten Instrumente bis zur Verwendung bitte staubgeschützt (z.B. Schublade).



Bitte beachten Sie:

- Sie können auch ein fertiges Instrumentendesinfektionsmittel verwenden, das Sie nicht mehr ansetzen (d. h. mit Wasser verdünnen) müssen (teurer).
- Es sollten ausschließlich geprüfte Instrumentendesinfektionsmittel verwendet werden (z.B. VAH-Liste).