

## การฆ่าเชื้อเครื่องมือ

1. ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือนั้น ขอให้ใช้อ่างที่มีฝาปิด



2. ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือให้ถูกต้องตรงตามที่คุณผลิต กำหนดไว้โดยตรง โดยใช้ถ้วยตวงที่เหมาะสม  
สวมถุงมือและแว่นตาป้องกัน ถ้ามี ในขณะที่ทำงานนี้ ด้วย!



3. โปรดคำนึงถึงเรื่องเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ยาออกฤทธิ์!



4. หลังทำการฆ่าเชื้อแล้ว ทำความสะอาดเครื่องมือและ  
ชะล้างด้วยน้ำที่เปิดไหลอยู่ตลอดเวลา จากนั้นเช็ดให้แห้ง  
เก็บเครื่องมือที่ได้รับการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดในที่ที่ป้องกันฝุ่นได้ (เช่น  
ในลิ้นชัก) จนกว่าจะนำไปใช้ใหม่



### สิ่งที่ควรคำนึงถึง:

- สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือแบบสำเร็จรูปได้ ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องผสมเอง (คือ ทำให้เจือจาง ด้วยน้ำ) อีกต่อไป (แพง)
- ควรใช้แต่น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือ ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว เท่านั้น (เช่น น้ำยาในรายการ VAH)