

Khử trùng các dụng cụ

1. Xin quý vị hãy sử dụng hộp có nắp đậy khi thực hiện việc khử trùng các dụng cụ.



2. Quý vị hãy pha chế dung dịch khử trùng cho dụng cụ đúng theo như các qui định của nhà sản xuất và hãy dùng cốc đo lường thích hợp cho việc pha chế.

Khi làm việc này xin nhớ mang bao tay và cũng như mang kính che mắt nếu như cần thiết



3. Xin quý vị lưu ý tôn trọng khoảng thời gian cần thiết cho việc thuốc tác dụng!



4. Sau khi khử trùng quý vị cần rửa và làm sạch lại các dụng cụ này bằng nước chảy từ trong vòi và sau đó lau khô. Xin quý vị hãy cất các dụng cụ đã được khử trùng và rửa sạch vào những nơi tránh bị bụi bặm (thí dụ như cất vào hộp tủ) cho đến khi sử dụng lại lần nữa.



Xin quý vị nhớ lưu ý:

- Quý vị cũng có thể sử dụng loại thuốc khử trùng cho dụng cụ đã được chế biến sẵn, loại mà quý vị không cần phải pha chế gì thêm cả (có nghĩa là dùng nước để pha loãng) (đặc biệt hơn).
- Nên tuyệt đối sử dụng các loại thuốc khử trùng cho dụng cụ đã được kiểm soát phẩm chất trước đó (thí dụ như trong danh sách VAH).